


Более функциональная альтернатива валикам - драйтипсы **НеоДрайс!**


NEODRYS™

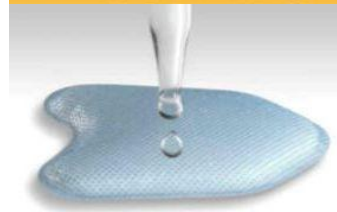

NeoDryS™ обыгрывает конкурентов

NeoDryS™ с его новым внутренним слоем быстро впитывает влагу, сохраняя рабочее поле сухим на целых 15 минут. Он не протекает, даже если его внутренний слой полностью пропитался слюной. Его влагонепроницаемое заднее покрытие защищает щеку от повреждения и отражает свет на рабочее поле. Новый край COMFORT EDGE™ сделан из мягкого неабразивного материала, не вызывающего дискомфорта. Благодаря абсорбции, защите и комфорту NeoDryS™ превосходит любой подобный продукт, существующий на рынке.

NeoDryS™ обеспечивает максимальную эффективность лечения, предотвращая попадание слюны из околоушной слюнной железы и превосходно защищая щеку.

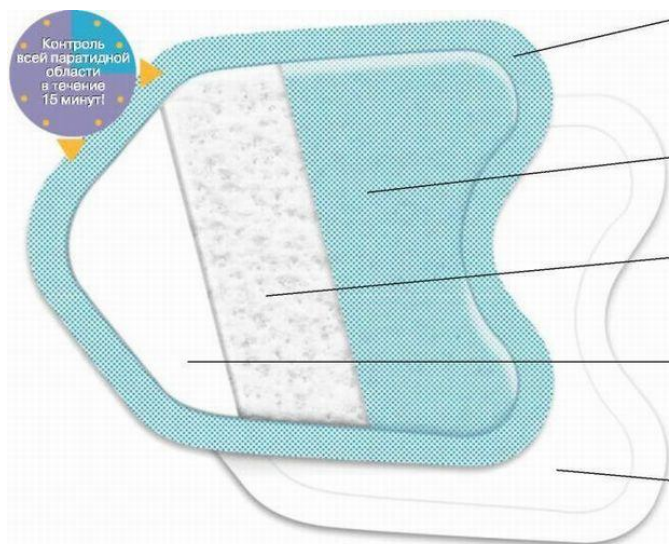

Контроль всей паратидной области в течение 15 минут!

Комфортный край "Без боли"
Новые технологии позволили создать мягкий гибкий край изделия, который в то же время сохраняет его целостность.

Не раздражает слизистую щеки
Полимерная сетка медицинского качества аккуратно приклеивается к мягким тканям.

Супер-абсорбирующая основа
При контакте со слюной акриловый полимер удерживает влагу, превращая ее в гель.

Упрочнитель основы
Введенный в основу упрочнитель обеспечивает изделию оптимальную жесткость, необходимую для ретракции щеки.

Защитная задняя подкладка
Белая полипропиленовая пленка защищает от влаги и повреждений, а также освещает полость рта.

Преимущества NeoDryS™

- Способен абсорбировать слюны в 30 раз больше своего собственного вес - это во много раз превосходит впитывающую способность ватных тампонов и других абсорбирующих прокладок.
- Полностью покрывает устье протока околоушной слюнной железы и всю слизистую щеки полиэтиленовой пленкой, создавая надежный барьер.
- Облегчает работу в задних участках полости рта.
- Не оставляет волокон или других кусочков материала в полости рта.
- Является эффективной заменой коффердаму во многих случаях.
- Гибкая конусовидная форма не препятствует движениям щеки, а мягкие края обеспечивают максимальный комфорт.
- Не смещается и в то же время легко удаляется водой из пюстера.

Цветовая кодировка размеров

NeoDryS™ имеет цветовую кодировку для быстрой идентификации. Выпускается двух размеров: большого (голубой) и маленького (желтый). Расфасован в удобных упаковках по 50 шт. в каждой.

Способ применения

Выберете подходящий размер NeoDryS™ так, чтобы он адекватно покрывал слизистую щеки. Поместите в полость рта, как показано на рисунке, цветной стороной к щеке и кончиком кзади.

Через несколько секунд NeoDryS™ приклеивается к щеке и остается на месте.
Важно: чтобы удалить NeoDryS™, не раздражая слизистую, ослабьте его адгезию водой из пюстера со щечной стороны.



заостренным концом кзади



А также представляем новинку:
Neo DryS™ Reflective - благодаря зеркальной поверхности внешнего слоя создает дополнительную подсветку в рабочей области.





ПЕРВЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИН, РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕЖЗУБНОГО ПРОСТРАНСТВА И КОМФОРТНОЙ ФИКСАЦИИ МАТРИЦЫ

ОТЛИЧНОЕ АНАТОМИЧЕСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ

Предыдущие модификации деревянных и пластиковых клиньев достаточно хорошо разделяют зубы, но не адаптированы к анатомическим особенностям аппроксимальных поверхностей и десны пациента. Весьма эластичный материал **Flexi Wedge™** и его внутренняя полость позволяют клину наиболее комфортно разделить зубы, не травмируя при этом десневой сосочек.



Flexi Wedge™ расширяется в полостях (деревянные клинья не расширяются в полостях!)

Flexi Wedge™ глубже погружается в анатомическое межзубное пространство, не травмируя десневой сосочек

Улучшенные силовые векторы

Традиционные плоскостонные клинья оказывают силовое воздействие на зубы и на десны при дополнительной нагрузке на прикус. Если вставить **Flexi Wedge™**, то на десны оказывается меньшее давление и, следовательно, большее усилие направлено на разделение зубов. Сечение **Flexi Wedge™** - больше сил направле-

но на разделение

Отсутствие подвижности

В отличие от гладких пластмассовых клиньев, которые имеют тенденцию смещаться, отклоняться после установки, у **Flexi Wedge™** есть рифленые направляющие для более надежной фиксации клина после установки. Закрепляющая рифленая поверхность удерживает клин на месте.

Лучшая цервикальная изоляция

Поскольку **Flexi Wedge™** могут плотно прилегать к аппроксимальной поверхности разнообразной формы, в реставрируемую полость не попадают ни слюна, ни кровь, что особенно важно при использовании современных композитных реставрационных материалов.

Продукция линии **Flexi Wedge™**

Flexi Wedge бывает пяти размеров, начиная с голубого детского (сравнимого по размеру с другими самыми маленькими клиньями) и заканчивая красным, самым большим адаптирующимся клином.

Flexi Wedge™ существует в пяти размерах

КРАСНЫЙ - ФИОЛЕТОВЫЙ - ЗЕЛЕНЫЙ - ОРАНЖЕВЫЙ - ГОЛУБОЙ

Наконец появился клин, подходящий для межзубного пространства. По мере того, как население стареет, перед стоматологической промышленностью встают задачи, связанные с реставрацией большего межзубного пространства, что вызвано рецессией. Поскольку в последнее время часто производятся процедуры, связанные с композитной и амальгамной реставрацией, возрос спрос на клинья, изолирующие слюну, кровь и цервикальную жидкость от полостных препаратов. **Flexi Wedge™** за счет своей уникальной выемки под поверхностью, прочного основного каркаса и эластичных фланцев соответствует потребностям современных стоматологов и их пациентов.

www.stomprod.ru info@stomprod.ru

телефон: (495) 730-51-23