

ПОРТАТИВНЫЙ МАССАЖНЫЙ СТОЛ

Bm2723

RELAX ALUMINIUM

инструкция по сборке



RELAX **ALUMINIUM**



Введение

Перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией. При правильном пользовании и обслуживании массажный стол прослужит в течении длительного срока.

В комплект входит:

Массажный стол 1шт. / Заглушка отверстия для лица 1шт. / Подголовник 1шт. Каркас подголовника 1шт. / Фронтальный подлокотник 1шт. / Подлокотник 2шт. Сумка-чехол 1шт / Инструкция 1шт.

Модель	BM2723-1.2.3
Наименование	Складной массажный стол с алюминиевым основанием
Размер	185*70*(60-80) см (регулировка высоты)
Максимальная	Не более 250 кг включая вес ползавателя и прилагаемое усилие при
нагрузка на стол	проведение процедур.

Складывание/Раскладывание




Этапы сборки

- 1. Чтобы разложить стол, расположите его на ровной поверхности боковой стороной вниз. Разложите стол медленно, пока он не откроется на 90 градусов. Затем разложите алюминиевые ножки.
- 2. Чтобы сложить стол, расположите его на ровной поверхности боковой стороной вниз. Складывайте стол медленно, пока он не сложится на 90 градусов. Затем сложите алюминиевые ножки.
- 3. Убедитесь, чтобы фиксирующие тросы не попали в месте соединений складываемых частей.

Установка подголовника



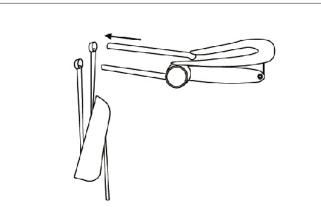

2. Вставьте трубки в специальные отверстия, к которым фиксируется фронтальный подлокотник.

RELAX **ALUMINIUM**




Установка подголовника





Регулировка высоты

Нажмите кнопку, расположенную на алюминиевой стойке. Одной рукой приподнимите верхнюю часть стойки, а другой рукой опустите нижнюю часть стойки на необходимую высоту. Установив высоту, нажмите на кнопку.

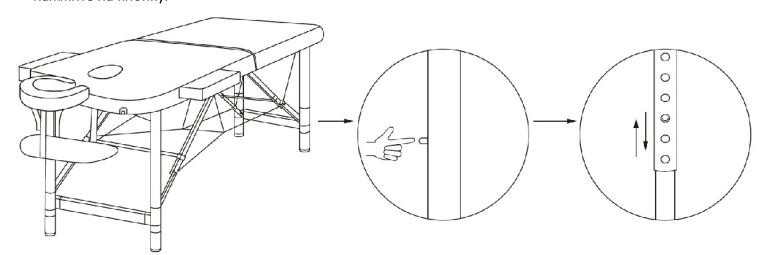

Уход

- 1. Используйте массажный стол по назначению.
- 2. Очищать стол от пыли и грязи следует теплой мыльной водой, а затем протирать его сухой тряпкой.
- 3. Не используйте для очистки грубые химические средства.
- 4. При длительном неиспользовании стола сложите его и уберите в сухое и прохладное место. Для этого расположите каркас подголовника и подголовник в специальное место под стол и закрепите эластичными ремнями.

Обслуживание

В случае поломки некоторых деталей обратитесь к продавцу для консультации.