

Сделано в
Болгарии

Фирма «СС ВАЙТ» предлагает покупателю широкий ассортимент стоматологических полировочных инструментов фирмы «NAIS». Большое количество форм, размеров и абразивности позволяет выбрать необходимый инструмент для обработки любого современного стоматологического материала.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ ПОЛИРЫ

Coarse

5,5 x 15	7 x 10	9 x 8,5	11 x 2	11 x 2,5	5 x 10	3 x 6
CF3C	CC1C	CC2C	CD1C	CL1C	CF2C	CF1C


Medium

5,5 x 15	7 x 10	9 x 8,5	11 x 2	11 x 2,5	5 x 10	3 x 6
CF3M	CC1M	CC2M	CD1M	CL1M	CF2M	CF1M


Fine

5,5 x 15	7 x 10	9 x 8,5	11 x 2	11 x 2,5	5 x 10	3 x 6
CF3F	CC1F	CC2F	CD1F	CL1F	CF2F	CF1F

Вся продукция компании «НАИС» сертифицирована согласно стандарту DIN EN ISO 13845, отвечает требованиям Директивы 94/92ЕЕС «О медицинских продуктах», а также имеет маркировку ЕС.

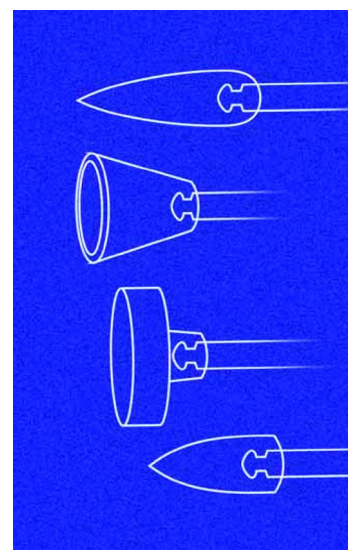

Закрытое акционерное общество «СС ВАЙТ»
 ТЕЛЕФОН: (495) 730-51-23, 952-23-51, 952-57-04, 952-01-47.
 ФАКС: (495) 952-04-80 E-mail: info@sswhite.ru Http: www.sswhite.ru

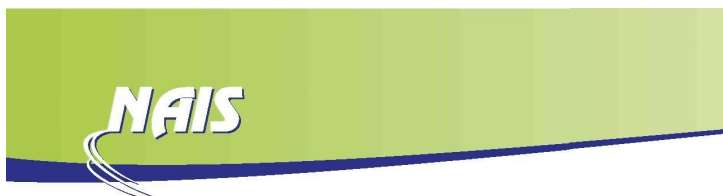

Сделано в
Болгарии

Все инструменты после применения должны быть стерилизованы перед каждым использованием, это особенно важно перед использованием впервые после покупки, так как все инструменты поставляются нестерильными.


СИЛИКОНОВЫЕ ПОЛИРЫ ДЛЯ АКРИЛА



Максимальная температура стерилизации:
134 °C (273 °F)

Время стерилизации:
выдержка минимум 20 минут при температуре стерилизации 121°C (250°F) или 5 минут при 132/134°C (270 °F)

Хранение:
До первого использования инструмент должен быть сохранен в его оригинальной упаковке при комнатной температуре без пыли и влажности. Впоследствии, инструменты должны быть сохранены в соответствующих контейнерах (защищенных от пыли, влажности и загрязнения). После стерилизации инструменты должны быть сохранены в стерильной упаковке. Пожалуйста, не забудьте отметить срок годности стерилизованного инструмента.

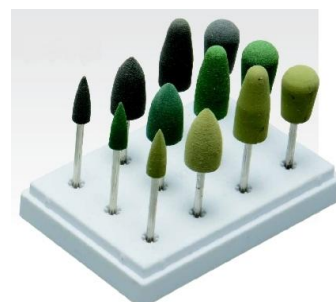

Закрытое акционерное общество «СС ВАЙТ»
ТЕЛЕФОН: (495) 730-51-23, 952-23-51, 952-57-04, 952-01-47.
ФАКС: (495) 952-04-80 E-mail: info@sswhite.ru Http: www.sswhite.ru